

曇りをおさえて快適撮影

Fogno フォグノ

- おだやかな送風で、口腔内写真撮影時のミラーの曇りを軽減します。
- 本体裏面のアームで、多くのミラーに取り付けが可能です。
- 送風口の左右に LED ライトを設け、撮影をサポートします。
- 一回の充電で 5 分 × 10 回の使用が可能です。
- 軽量（約 100g）、コンパクトな設計です。



お使いのミラーが簡単に取り付けられ、おだやかな送風で撮影時のミラーの曇りを軽減できるデントロニクスの防曇ファン「フォグノ」です。

今、お使いのミラーのほとんどが取り付けられます。

5分間で自動的に送風をストップします。

コンパクト、軽量、持ちやすいデザインで撮影者の負担を軽くします。





フォグノの使い方

フォグノの固定アーム支持ピンにガタつきがなく、正常に作動する事を確認してください。

アームロックを解除し、アームを起こします。

ミラーの有効面と本体固定部とのバランスを調整します。固定部のバランスが悪いと、撮影中にとれてしまうことがあります。

固定アームで挟んだ後、アームロックを右側へ倒し固定します。その後、ミラーが確実に固定され、安全に使用できるかを確認してください。

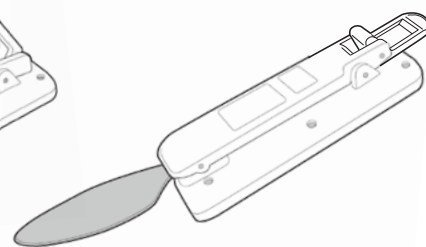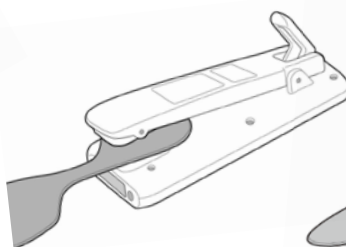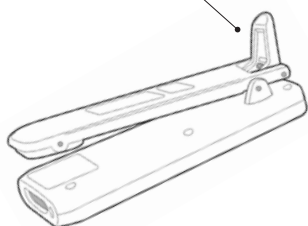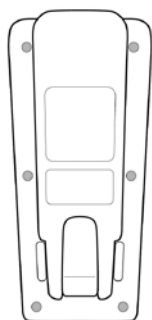

バッテリーが少なくなると、送風ボタンのLEDが点滅してお知らせします。

充電中、充電完了をLEDでお知らせします。



〈仕様〉

- ・長さ：131mm／幅：61mm／厚さ：30mm／重さ：107g
- ・Li-ion (3.7V/400mAh) バッテリー充電式／付属品：充電用ケーブル 1 本

価格 29,800円（税別）

* ミラーは別売りです

販売元

Dentronics 株式会社 デントロニクス

〒162-0042 東京都新宿区早稲田町 68 大野ビル TEL(03)3209-7121 FAX(03)3232-6764
www.dentronics.co.jp

● 写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。
● 仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。